

Bestellung

Ich möchte das WoundLyser 1M Set bestellen
(Art.Nr. 102121)

- ✓ 1 x Duschfilter WoundLyser 1M
- ✓ 1 x Bacillol-Tissues

Einzelpreis € 41,50 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Anzahl: Stück

Ich möchte das WoundLyser 2M Set bestellen
(Art.Nr. 102122)

- ✓ 1 x Duschfilter WoundLyser 2M
- ✓ 1 x Bacillol-Tissues

Einzelpreis € 64,90 inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Anzahl: Stück

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt per Fax oder Post direkt an Aqua free GmbH (siehe Kontaktdaten)

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Datum/Unterschrift

Aqua free GmbH

Ist einer der europaweit führenden Serviceanbieter im Bereich der Wasserhygiene und zählt zu den größten europäischen Herstellern von medizinischen und nicht-medizinischen Wasserfiltern. Ursprünglich an einer technischen Universität gegründet, besitzt die Aqua free GmbH eine über 20-jährige Firmenhistorie.



Kontaktieren Sie uns:

Winsbergring 31
22525 Hamburg
Germany

+49 (0)40 46 89 99-90
info@aqua-free.com
aqua-free.com

Wir wünschen eine schnelle Linderung Ihrer Beschwerden!
Dieses Informationsblatt wurde überreicht durch:



Ihr Spezialist
für Wasserhygiene.

WoundLyser 1M und 2M Wundspülung mit sterilfiltriertem Wasser



WoundLyser 1M und 2M

Der WoundLyser ist ein medizinischer Wasserfilter zur Bereitstellung von sterilfiltriertem Leitungswasser für die Spülung von chronischen Wunden.



Sicherer Schutz für
1 oder 2 Monate
(Variante 1M oder 2M)

- ° Gründliche und schonende Wundreinigung
- ° Sicherer Schutz vor Keimen aus dem Leitungswasser für 1 Monat (1M) bzw. 2 Monate (2M) – auch beim Duschen
- ° Einfache Installation am Duschschauch
- ° Hygienische Handhabung: Set mit Desinfektionstüchern
- ° CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt

PF-WoundLyser-DE_11/2020_V01

Wundversorgung

Die Basis für eine zügige und problemlose Heilung Ihrer Wunde bildet eine professionelle Wund-Versorgung. Damit bei der Wundspülung (z.B. beim Verbandwechsel) keine zusätzlichen Keime in den Wundbereich kommen können, müssen die Wund-Spüllösungen steril bzw. sterilfiltriert sein. Sterilfiltriertes Leitungswasser wird von Experten daher verstärkt empfohlen.

Besprechen Sie mit Ihrem behandelnden Arzt, Pflegedienst oder Wundexperten das richtige Vorgehen und die Spülungshäufigkeit für Ihre Wunde.

Sterilfiltriertes Wasser

Im Vergleich zu anderen Spüllösungen bietet die Verwendung von sterilfiltriertem Leitungswasser Ihnen viele Vorteile:

- ° In unbegrenzter Menge verfügbar
- ° Individuell temperierbar
- ° Stufenlos regelbarer Spüldruck
- ° Ein schonender und nahezu schmerzfreier mechanischer Reinigungseffekt

Trotz gesetzlicher Trinkwasser-Anforderungen können sich Keime in den Wasserleitungen festsetzen und einen Biofilm bilden. Häufige Ursachen hierfür sind schlecht isolierte oder selten genutzte Leitungen oder eine zu geringe Wassertemperatur.



Zur sanften
Linderung Ihrer
Beschwerden

Bei nicht sterilfiltriertem Wasser können Krankheitserreger wie z.B. *Pseudomonas aeruginosa* im Wasser vorhanden sein und so schwere Entzündungen der Wunde verursachen. Deshalb ist es wichtig, für die Wundspülung sterilfiltriertes Leitungswasser einzusetzen.

Anwendung

Diese endständigen, medizinischen Wasserfilter sind speziell für die Wundspülung entwickelt, validiert und freigegeben. Der WoundLyser wird anstelle der vorhandenen Handbrause am Duschschauch installiert. Die feinen Membranporen (0,2 µm) halten zuverlässig Keime aus dem Wasser zurück und gewährleisten so sterilfiltriertes Leitungswasser.

Vor und nach jedem Spülen der Wunde wird der Filter aus hygienischen Gründen von außen wischdesinfiziert. Hierfür stellen wir Ihnen (im Set inklusive) spezielle Desinfektionstücher zur Verfügung.

Hinweis: Nach 1 bzw. 2 Monaten (gerechnet ab dem ersten Einsatz), wird der benutzte Filter durch einen neuen Filter ersetzt. Entsorgung: problemlos im Hausmüll.